

KULLANMA TALİMATI

BU KULLANMA TALİMATI ÖNEMLİ ÜRÜN KULLANIM VE GÜVENLİK BİLGİLERİ İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN BU BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. KONTAKT LENSLER HER ZAMAN BİR GÖZ DOKTORU TAVSİYESİ İLE KULLANILMALIDIR. KONTAKT LENSLERİNİZİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN GÖZ DOKTORUNUZUN TALİMATLARINA VE TÜM ETİKET TALİMATLARINA UYMANIZ ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

ÜRÜN İSMİ

- AIR OPTIX™ COLORS (lotrafilkon B) kontakt lens

ÜRÜN TANIMI

Lens materyali yaklaşık % 33 su ve % 67 lotrafilkon B'den oluşur; lotrafilkon B yüzeyi işlem görmüş hidrojel içeren bir florosilikondur. Kozmetik bir baskı paterni lensin arka yüzeyinin içine yerleştirilerek uygulanmıştır ve aşağıdaki renk katkılarının bir bileşimini içerir: karbazol moru, demir oksitler [fitalosiyanimato (2-)] bakır, fitalosiyanın yeşili ve titanyum dioksit.

TEKNİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Lens Özellikleri

- Kırılma İndisi (hidrate): 1,42
- Lüminöz Işık Geçirgenliği: % 95 ± % 5
- Oksijen Geçirgenliği (Dk): 110×10^{-11} (cm²/sec) (ml O₂/ml x mm Hg), 35°C'de ölçülmüştür (içsel Dk-Kulometrik yöntem)
- Su içeriği: Normal salin içinde ağırlığa göre %33

Mevcut Lens Parametreleri

- Çap: 14,2 mm
- Temel Eğri: 8,6 mm
- Merkez Kalınlığı: -3,00 D'de 0,08 mm (güce göre değişir)
- Güçler: Eksi: -0,25 D ile -6,00 D (0,25 D aralıklarla)
-6,50 D ile -8,00 D (0,50 D aralıklarla)
Artı: +0,25 D ile +6,00 D (0,25 D aralıklarla)
Ametist, Mavi, Parlak Mavi, Kahverengi, Cevher Yeşili, Gri, Yeşil, Bal Rengi, Saf Ela, Som Gri, Gerçek Safir, Turkuaz
- Baskı Renkleri:

ETKİLER (Etki Mekanizması)

Düzeltilici güce sahip lotrafilkon B kontakt lensler, kornea üzerine nemli olarak yerleştirildiğinde, ışık ışınlarını retina üzerine odaklayan kırıcı bir ortam görevi görür.

Renk baskılı lotrafilkon B kontakt lensler için baskı paterni gözün görünen rengini vurgulamak ya da değiştirmek için doğal göz rengi ile birleşir

KULLANIM AMACI

Düzeltilici güce ve renkli baskıya sahip Lotrafilkon B yumuşak kontakt lensler göz doktoru tarafından belirlenen ve uyarlanan şekilde, görüş düzeltmeye (miyopi ve hipermetropi) ihtiyaç duyan ve gözün rengini iyileştirmek ya da değiştirmek isteyen, sağlıklı gözlerle sahip kişilerde göz üstü kullanıma yöneliktir.

Lens Tasarımına (Modele) Özgü Kullanım Amacı

Lens Tasarımı (Modeli)	Kullanım Amacı (Gözde)
Sferik - Renkli baskılı, düzeltilici güçlü	Refraktif ametropinin (miyopi ve hipermetropi) optik düzeltilmesi
	Gözün görünür renginin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi

HASTA HEDEF GRUPLARI

Düzeltilici güce sahip lotrafilkon B yumuşak kontakt lenslerin amaçlanan kullanım popülasyonu arasında gözlerinde hastalık olmayan, görüşünde düzeltme yapılması gerekli olan (miyopi ve hipermetropi), veya presbiyopi (refraktif ametropi olarak veya olmaksızın) görüşünde düzeltme yapılması gerekli olan, cihaza uygun gözlerle sahip ve kullanım için takma, bakım ve güvenlik talimatlarını anlayabilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olan (veya kendi adlarına hareket edebilen bir bakıcıları bulunan) kişiler vardır. Kontakt lensler yaygın olarak erişkinler ve ergenler tarafından kullanılmaktadır. Çocuklar kontakt lenslerini yetkin bir göz doktoru gözetimi altında ve ebeveynlerinin denetimi ile takabilirler.

AIR OPTIX™ COLORS kontakt lensler, gözün rengini iyileştirmek ya da değiştirmek isteyen hastalar için kozmetik renkli baskı özelliğine de sahiptir.

KLİNİK FAYDALAR

Düzeltilici güce sahip lotrafilkon B yumuşak kontakt lensler, göz doktoru tarafından belirlenen ve uyarlanan şekilde, miyopi ve hipermetropi için göz üstü optik düzeltme sağlamaktadır.

Düzeltilici güce sahip kontakt lensler periferik (yan) görüşü iyileştirmek ve gözler arasındaki lens güçlerinin aynı olmasından kaynaklanan görüntü boyutu farklarını en aza indirmek suretiyle gözlüğe kıyasla fonksiyonel avantajlar sunmaktadır.

ENDİKASYONLAR (Kullanım)

AIR OPTIX™ COLORS (lotrafilkon B) sferik yumuşak kontakt lensler, gözlerinde hastalık olmayan ve görme keskinliğini etkilemeyen yaklaşık 1,50 diyoptriye (D) kadar astigmatı olan fakik veya afakik kişilerde refraktif ametropinin (miyopi ve hipermetropi) optik olarak düzeltilmesinde endikedir.

AIR OPTIX™ COLORS (lotrafilkon B) Yumuşak Kontakt Lensler aynı zamanda göz renginin iyileştirilmesini veya değiştirilmesini de sağlar.

Lensler, göz doktoru tarafından önerilen şekilde, her gün tekrar takılmadan önce temizleme ve dezenfeksiyon çıkartılarak sık sık/pırlanlı olarak değiştirilerek kullanılmalıdır. Lensler her ay veya göz doktorunun tavsiyesi doğrultusunda daha sıklıkla atılmalı ve yenisiyle değiştirilmelidir.

KONTRENDİKASYONLARI (Kullanılmaması gereken durumlar)

Kontakt lensler belirli sağlık veya çevre koşullarında kullanılmamalıdır. Güvenli kontakt lens kullanılmasını engelleyebilecek veya etkileyebilecek durumlar şunlardır:

- Gözde, göz çevresinde veya göz kapaklarında alerji, inflamasyon, enfeksiyon veya tahriş
- Yetersiz gözyaşı filmi (göz kuruluğu)
- Korneal hipoestezi (azalmış kornea hassasiyeti)
- Kontakt lensin kullanımını önleyecek veya kontrendike olan, göz ilaçlarını da içeren herhangi bir ilaç kullanımı
- Kontakt lens takılmasını etkileyebilecek veya bununla kötüleşebilecek herhangi bir sistemik hastalık
- Gözlerde kızama veya tahriş olması

Özellikle bu veya diğer durumlar ile ilgili olarak göz doktorunuza danışın.

UYARILAR

- Günlük lensler gece kullanım için endike değildir. AIR OPTIX™ COLORS yumuşak kontakt lensler uyurken kullanılmamalıdır.
- Kontakt lensler, kozmetik nedenlerle kullanılsa bile yalnızca bir göz uzmanının yönlendirmesi ve gözetimi altında kullanılması gereken medikal cihazlardır.
- Kornea ülserleri (ülseratif keratit) dahil ciddi göz problemleri hızla gelişerek, görme kaybına yol açabilir.
- Kontakt lens kullanımı, göz enfeksiyonu riskini artırır. Lenslerle uyumak ve/veya sigara kullanımı, kontakt lens kullanıcıları için ülseratif keratit riskini artırır (Schein, 1989; Cutter, 1996).
- Bir hastada göz rahatsızlığı, yabancı cisim hissi, aşırı gözyaşı oluşumu, görme değişiklikleri, göz kızarıklığı veya diğer görsel sorunlar olması durumunda hastaya bir an önce lensleri çıkarması ve hemen göz doktoru ile iletişime geçmesi gerektiği söylenmelidir.
- Kontakt lensler ve lens bakım ürünleri ile ilgili sorunlar gözde ciddi bir hasara neden olabilir. Kontakt lenslerin ve lens bakım ürünlerinin doğru kullanımı için kullanıcıların göz doktorlarının direktiflerine ve etiket talimatlarına uymaları önemlidir.
- Steril olmayan sıvılar (yani, çeşme suyu, distile su, ev yapımı salin çözümü veya salya) lens bakım sürecindeki herhangi bir bileşenin yerine kullanılmamalıdır. Çeşme suyu ve distile su kullanımı tedavi ve bakıma dirençli bir kornea enfeksiyonu olan Acanthamoeba keratiti ile ilişkilendirilmiştir.

ÖNEMLER

Göz Doktoru için Özel Önlemler

- Uygun lens tasarımı ve parametreleri seçilirken, göz doktoru, lensin oksijen geçirgenliği, merkezi ve periferik kalınlık ve optik zon çapı gibi lens performansını ve göz sağlığını etkileyebilecek tüm özelliklerini değerlendirmelidir.
- Uygunluğunu belirlemek ve tanı için kullanılan deneme lensleri, tek bir kullanımdan sonra atılmalı ve başka hastada kullanılmamalıdır.
- Hastanın göz sağlığı ve lensin gözdeki performansı, ilk uygulama sırasında dikkatlice değerlendirilmeli ve reçeteyi yazan göz doktoru tarafından düzenli olarak izlenmelidir.
- Sarı bir boya olan fluoresein, lensler hastanın gözlerindeyken kullanılmamalıdır. Lensler bu boyayı emer ve renk kaybına uğrarlar.
- Kozmetik olarak renklendirilmiş ya da baskılı kontakt lensler düşük ışıklı ortamda görmeyi azaltabilir.
- Dişabet hastalarında korneal duyarlılık azalabilir; dolayısıyla korneal hasara daha yakındır ve diyabeti olmayan hastalardaki kadar hızlı ya da tam iyileşme göstermezler.
- Gebelik ya da oral kontraseptif kullanımı sırasında görme değişiklikleri ya da lens toleransında değişiklik ortaya çıkabilir. Hastalar bu duruma karşı uyarılmalıdır.
- Göz doktorları, gözlerde kızama ya da tahriş olması durumunda lensleri hemen çıkarmaları konusunda hastaları uyarmalıdır.
- Göz doktorunun muayene odasından ayrılmadan önce hastalar, lensi gereken zamanda çıkarabilir hale gelmelidir ya da lensi çıkarabilecek bir kişiye sahip olmalıdır.
- Hastanın göz sağlığının korunması için rutin göz muayeneleri gereklidir. Alcon, hastaların göz doktoru önerisi doğrultusunda, göz doktorlarını yılda bir kez veya daha sık ziyaret etmelerini önermektedir.

Lens Kullanma ve Takma Önlemleri

- Gözlerinizi, her gün, iyi gördüklerinden, rahat hissettiklerinden ve görüşünüzün net olduğundan emin olmak için kontrol ediniz.
- Blister ambalaj hasar görmüş veya tamamen kapatılmamışsa ise kullanmayınız. Böyle bir durumda ürünü kullanmak, ciddi bir göz enfeksiyonuna yol açabilecek ürün kontaminasyonuna neden olabilir.
- Lensin kullanılması amaçlanmadan önce blister ambalajın istenmeden açılması durumunda, lens temiz bir lens kutusunda muhafaza edilmelidir. Lens bakım ürünlerinin hepsi aynı değildir; bu nedenle takmadan önce lensin saklanması, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konusunda üreticinin kullanma talimatlarını izleyin.
- Gözlerinizin sağlığını ve güvenliğini korumak adına, lens takma programı bir göz doktoru tarafından belirlenmelidir. AIR OPTIX™ COLORS yumuşak kontakt lensleri uyurken kullanmayınız.
- Lenslerinizi kimseye paylaşmayınız; bunu yapmanız, mikroorganizmaların yayılarak, ciddi göz sağlığı sorunlarına yol açmasına neden olabilir.
- Kontakt lenslerin steril olmayan sıvılarla (musluk suyu ve tükürük dahil) temasına asla izin vermeyiniz; bu durum, mikrobiyal kontaminasyon sonucu kalıcı göz hasarına neden olabilir.
- Yüzme ve diğer su ile ilgili aktiviteler dahil spor aktivitelerinde lens kullanmadan önce göz doktorunuza danışınız. Kontakt lensler takılıyken yüzme, su kayığı ve sıcak su havuzları gibi aktivitelerde suya (veya steril olmayan diğer sıvılara) maruz kalınması göz enfeksiyonu (Acanthamoeba keratitisi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) riskini artırabilir.
- Zararlı veya tahriş edici buhara maruz kaldığınızda lensleri çıkarıp atınız.
- Kurumuş veya hasarlı kontakt lensleri atınız. Yerine yeni lensler kullanınız.
- Kontakt lens kullanıcılarının, yılda en az bir kez veya önerildiği şekilde göz doktoruna gitmeleri önerilir.
- Özellikle sizin göz koruyucu ekipman kullanımı gerektiriyorsa işvereninizi kontakt lens kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.
- Her bir göz için doğru lens gücünü not ediniz. Lensi takmadan önce, her bir folyo ambalajda yazan lens gücünün o göz için doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Göz doktorunuza danışmadan lens tipini veya parametrelerini değiştirmeyiniz.
- Eğer lens uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, lensleri tekrar takmaya başlamadan önce göz doktorunuza danışınız.
- Lenslerinizle temas etmeleri halinde tahrişe yol açabileceklerinden, sabun, losyon, krem, kozmetik ürünler ve deodorantları kullanırken dikkatli olunuz.
- Lensleri makyaj yapmadan önce takınız ve makyajı silmeden önce çıkarınız.
- Yanınızda daima yedek lens veya gözlük taşıyınız.
- Son kullanma tarihinden sonra lensleri kullanmayınız.

- Kozmetik olarak renklendirilmiş ya da baskılı kontakt lensler düşük ışıklı ortamda görmeyi azaltabilir.
- AIR OPTIX™ COLORS yumuşak kontakt lensler, metalik bazlı bir boyar madde olan demir oksit içerir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR veya MR taraması olarak da adlandırılmaktadır) yapılmadan önce lensler çıkarılmalıdır.

ADVERS REAKSİYONLAR (Olası sorunlar ve yapılması gerekenler)

Kontakt lens kullanımı ile problemler görülebilir ve başlangıçta aşağıdaki belirti ve semptomlarından biri ya da daha fazlası ile kendini gösterebilir:

- Göz içinde bir şey varmış hissi (yabancı cisim hissi)
- Konforsuz lensler
- Göz kızarıklığı
- Işığa hassasiyet (fotofobi)
- Gözlerde yanma, batma, kaşınma ya da sulanma
- Görme keskinliğinde azalma
- Işıkların çevresinde gökkuşağı ya da halkalar
- Göz salgılarında artış
- Rahatsızlık veya ağrı
- Şiddetli veya sürekli göz kuruluğu

Bu belirtiler dikkate alınmazsa daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

BİR SORUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Yukarıdaki belirti veya semptomlardan herhangi biri meydana gelirse, lens(ler) derhal çıkarılmalıdır.

- Rahatsızlık veya sorun düzelirse, lens(ler)i yakından inceleyin.
 - Lens herhangi bir hasar görmüşse, gözünüze tekrar takmayınız. Yeni bir lensele değiştiriniz veya göz doktorunuza danışınız.
 - Lens üzerinde kir, kırık veya yabancı bir cisim varsa ya da sorun düzelirse ve lens hasarsız gibi görünüyorsa, lensi takmadan önce iyice temizleyiniz, durulayınız ve dezenfekte ediniz.
- Yukarıdaki semptomlar lensin çıkarılması ve tekrar takılmasından sonra da devam ederse, lensi derhal çıkarın, ardından hemen göz doktorunuza iletişime geçiniz.

Enfeksiyon, korneal ülser (ülseratif keratit) veya iritis gibi ciddi bir durum söz konusu olabilir. Bu rahatsızlıklar hızla ilerleyebilir veya kalıcı görme kaybına yol açabilir. Komplikasyonları önlemek amacıyla aşınma, epitel boyanması ve bakteriyel konjunktivit gibi daha az ciddi reaksiyonlar derhal kontrol altına alınmalı ve komplikasyonların önlenmesi için uygun şekilde tedavi edilmelidir.

- Ara sıra görülen kuruluk, birkaç kez tam göz kırpmayla ya da yumuşak kontakt lenslerle kullanılmak üzere onaylanmış kontakt lens yeniden ıslatma damlaları ile geçirilebilir. Kuruluk devam ederse, göz doktorunuza danışınız.
- Lens yapıyorsa (hareket etmezse), gözünüze birkaç damla kontakt lens nemlendirme solüsyonu uygulayınız ve lens gözünüzde serbestçe hareket etmeye başlayana kadar bekleyiniz. Bu sorun devam ederse, göz doktorunuza danışınız.
- Lens, göz merkezinden kayarsa, tekrar merkeze getirmek aşağıdaki şekillerde mümkün olabilir:
 - Göz kapaklarınızı kapatmak ve nazikçe masaj yaparak lensi yerine yönleltmek,
 - Lensin yönüne bakmak ve nazikçe göz kırpma ya da
 - Alt ya da üst göz kapağı kenarından parmakla hafifçe bastırarak, merkezden kaymış lensi kornea üzerinde nazikçe itmek.
- Lens gözünüzde yırtılırsa, lens parçalarını normal lensi çıkardığınız şekilde tutarak dikkatlice çıkarınız. Lens parçaları kolayca çıkmıyorsa göz dokusunu sıkıştırmayınız. Salın ile durulayınız ve lens parçalarını çıkartmayı yeniden deneyiniz. Bu işlem işe yaramazsa yardım için göz doktorunuz ile iletişime geçiniz.

Genel Acil Durumlar:

Gözlerinize herhangi bir türde kimyasal (ev ürünleri, bahçe solüsyonları, laboratuvar kimyasalları vs.) sıçarsa:

- Gözlerinizi derhal serum fizyolojik solüsyonu veya çeşme suyu ile yıkayınız.
- Lensi çıkarıp atınız ve derhal göz doktorunuzu arayınız ya da gecikmeden bir hastane acil servisine gidiniz.

CİDDİ OLAY RAPORLAMA

Bu tıbbi cihazın kullanımından kaynaklanan tüm ciddi olaylar Alcon Laboratories, Inc.'e bildirilmelidir:

AB: AB- yerel ülke bürosu veya Alcon distribütörünüz ile temas kurun

E-posta: qa.complaints@alcon.com

Web sitesi: <https://www.alcon.com/about-us/contact-us>

Ciddi olgular ayrıca Üye Ülkenizin tıbbi Cihazlar için yetkili makamına bildirilmelidir

KULLANIM KILAVUZU

ÖNERİLEN TAKMA VE YENİSİYLE DEĞİŞTİRME PROGRAMI

Takma ve yenisiyle değiştirme programı hastanın kişisel ihtiyaçları ve fizyolojik koşulları temelinde göz doktoru tarafından belirlenmelidir. Lensler sadece günlük kullanım için (uyanıkken 24 saatten az) onaylanmıştır ve uyumadan önce çıkartılmalıdır. Günlük kullanma süresi önerilen maksimum süreye kadar yavaşça artırılabilir.

Lensler her ay veya göz doktorunun tavsiyesi doğrultusunda daha sıklıkla atılmalı ve yenisiyle değiştirilmelidir.

LENS KULLANIM TALİMATLARI

- Kontakt lenslere dokunmadan önce, daima ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Açmadan önce blister ambalajı (yeni lens içeren) nazikçe sallayınız.
- Avucunuza dikkatlice aktarak, lensi blister (veya daha önce kullanılmış lensler için lens saklama kabı) ambalajından çıkarınız.
- Lensin tarafının doğru olduğundan emin olunuz ve her göz için doğru lensi kullanınız.
- Kullanmadan önce lensleri kontrol ediniz.
- Hasarlı ve temiz olmayan lensleri kullanmayınız.

LENS TAKMA TALİMATLARI

- Lense dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Lensi, temiz ve kuru sağ ya da sol işaret parmağınızın ucuna yerleştiriniz. Aynı elinizin orta parmağını alt kirpiklerin yakınına yerleştirip alt göz kapağınızı aşağıya çekiniz.
- Diğer elinizin parmaklarını kullanarak üst göz kapağınızı kaldırınız.
- Lensi doğrudan gözün (kornea) üzerine yerleştirerek parmağınızı nazikçe lensten çekiniz.
- Aşağı bakarak alt göz kapağınızı yavaşça bırakınız.
- Doğrudan karşıya bakınız ve üst göz kapağını yavaşça bırakınız
- Nazikçe göz kırpiniz.

LENS ÇIKARMA TALİMATLARI

- Ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Birkaç kez tam göz kırpiniz.
- Yukarı bakarken parmağınızın ucu ile lensi gözün beyaz kısmı üzerine doğru kaydırınız.
- Lensi başparmağınız ve işaret parmağınız arasında yavaşça sıkıştırarak çıkarınız. Göz dokusunu sıkıştırmayınız.
- Lensin çıkması güç oluyorsa, kayganlaştırıcı ve ıslatıcı damla damlatınız ve birkaç dakika sonra tekrar deneyiniz.
- Lens kabından ya da gözünüzden lensi çıkarmak için asla cımbız, vakum, keskin nesne ya da tırnağınızı kullanmayınız.

Lensin çıkarılması konusunda sorun yaşarsanız yukarıdaki **BİR SORUN GÖRÜLÜRSE YAPILMASI GEREKENLER** bölümünü inceleyiniz.

LENSLERİN BAKIMI İÇİN TEMEL TALİMATLAR

- Lensler gözden her çıkarıldığında, yeniden kullanılmadan önce uygun şekilde temizlenmeli, durulanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
 - Göz doktoru uygun bir lens bakım sistemi için öneri ve talimatlarda bulunmalıdır. Öncelikle göz doktoruna danışmadan lens bakım sistemini değiştirmeyin.
 - Lens bakım ürünleri farklı kullanım ve talimatlara sahiptir. Göz problemlerinden veya lenslerinizin zarar görmesinden kaçınmak üzere kullanılan ürün(ler) için daima üreticinin talimatlarını okuyup, bunlara dikkatlice uyun.
 - Bazı lens bakım ürünleri, bir omma ve durulama basamağı gerektirir. Bu durumda ciddi göz enfeksiyonları riskini azaltmak üzere lens bakımı üreticisinin solüsyon miktarı ve yıkama süresi talimatlarına uyun.
- Lenslerinizin Sıvıya Batırılması ve Saklanması:
 - Lenslerinizin sıvıya batırdığınız (sakladığınız) her seferinde sadece taze kontakt lens bakım solüsyonu kullanın.
 - Lenslerinizi temizleme, durulama ve dezenfeksiyon basamaklarının tekrar edilmesi gerekmeden önce saklayabileceğiniz süre kullanılan lens bakım ürününe bağlı olarak değişecektir. Üreticinin talimatlarına uyun.
 - Solüsyonun yeniden kullanımı etkili lens dezenfeksiyonunu azaltıp, şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabileceğinden lens kutunuzda kalmış eski solüsyonu yeniden kullanmayın veya "üzerine ekleme yapmayın". "Üzerine ekleme yapmak", lens kutunuzda bulunan solüsyonun üzerine taze solüsyon eklemek anlamına gelir.
- Bir lens bakımı ürününü açtıktan sonra, ürünün üreticisi tarafından önerilen süre sonrasında kalan solüsyonları atın.
- Sadece sert veya katı gaz geçiren lensler için tasarlanmış ürünleri kullanmayın.
- Isıyı hiçbir zaman lens bakım solüsyonları ile veya lensleri dezenfekte etmek için kullanmayın.
- Lenslerinizi dezenfekte etmek üzere hiçbir zaman su, salin veya nemlendirici damlaları kullanmayın. Bu solüsyonlar lenslerinizi dezenfekte etmeyecektir. Önerilen dezenfeksiyon solüsyonunun kullanılmaması şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir.

LENS BAKIM SOLÜSYONLARI

Göz doktoru tarafından önerilen lens bakım ürünleri için üreticinin talimatlarına uyun. Eğer mevcut ise, Alcon aşağıdaki ürünleri önermektedir:

- AOSEPT™ PLUS Temizlik ve Dezenfeksiyon Solüsyonu
- OPTI-FREE™ PureMoist™ Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu

LENS KUTUSU İÇİN TEMEL TALİMATLAR

Kontakt lens bakım solüsyonları ve kontakt lens kutuları değişikdir ve farklı kullanım amaçları ve talimatlarına sahiptir. Bazı kutular özellikle kontakt lenslerin saklanması amacı taşıırken, diğerleri özellikle hidrojen peroksit temizleme ve dezenfeksiyon sistemleri ile kullanım için nötralize edici bir disk içerecek şekilde tasarlanır. Günlük bazda takılmazsa, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş lensler kullanılan kontakt lens solüsyonu ve lens kutusuna bağlı olarak değişen zaman sürelerinde açılmamış kapta saklanabilir. **Kullanılan bakım ürünleri için daima üretici yönergelerini izleyiniz.**

- Göz doktoru hastaya önerilen lens bakım solüsyonu (solüsyonları) ve lens kutusunun nasıl kullanılacağını açıklamalıdır.
- Kontakt lens kutuları bakteriyel üreme kaynağı olabilir ve kontaminasyondan veya lenslerin zarar görmesinden kaçınmak üzere uygun temizlik, kurutma ve yenileme gerektirir:
 - Kontakt lens kutularını uygun kontakt lens solüsyonu ile temizleyin ve lens kutusu talimatlarına göre kurutun. Havada kurutma veya tüysüz bir havlu ile silme gibi kurutma talimatları kullanılan lense bağlı olarak değişebilir.
 - Kontakt lens kutuları en az her 3 ayda bir kez ya da lens kutusu üreticisinin önerisine uygun şekilde değiştirilmelidir.
 - Bir nötralize edici disk içeren özel olarak tasarlanmış lens kutuları üretici talimatlarına göre veya temiz ve dezenfekte edilmiş lensler yanma ve batmaya sebep oluyorsa daha erken bir vakitte yenisiyle değiştirilmelidir.
 - Lensler su veya herhangi bir steril olmayan solüsyon ile saklanmamalı veya lens kutusu bunlarla yıkanmamalıdır. Lenslerinizin ve lens kabının kontaminasyonundan kaçınmak için yalnızca taze lens bakım solüsyonu kullanınız. Steril olmayan solüsyon kullanımı şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir.

İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM

Kontakt lensleri ve blister ambalaj kapağını çöp kutusuna, lavaboya veya tuvalete atmayınız. Karton ambalaj ve blister ambalajın polipropilen (PP) plastik kaplaması çöp kutusuna atılmalı veya yerel atık yönetimi kılavuzuna göre geri dönüştürülmelidir.

TAKDİM ŞEKLİ

Her bir lens, %1 Kopolimer 845 (% 0.2 Vinilpirrolidon/Dimetilaminoetilmetakrilat Kopolimer) içeren ve buharla sterilize edilmiş olan folyo ile kapatılmış blister bir ambalajda sunulmaktadır.

Blister ambalajda, temel eğri, çap, diyoptri, lens baskı paterni/rengi, üretim lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi de dahil olmak üzere lens parametreleri yer alır.

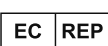
Lensler 6 adet tekli paketler içerisinde kontakt lens içeren ambalajlanmış kartonlarda sunulur.

REFERANSLAR

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. The CLAO Journal. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. N Eng J Med. 1989; 321(12):773-83.

ETİKETTE KULLANILAN SEMBOLLER

SEMBOL	TANIM
BC	Temel Eğri
DIA	Çap
PWR	Güç
D	Diyoptri (lens gücü)
L	Sol
R	Sağ
VP/DMAEMA	Vinilpirrolidon/Dimetilaminoetilmetakrilat
	Ambalaj atığı lisans işareti
	Seri kodu
	Son kullanma tarihi
EXP	Son kullanma tarihi
	Tek steril bariyer sistemi
	Buharla sterilize edilmiştir
	Avrupa uygunluk işareti
	Dil için iki harfli kod (Resimdeki örnek: İngilizce)
	Dikkat
	Kullanım talimatlarına bakın
	Blister ambalaj hasarlıysa kullanmayınız
	Üretici
	Üretim Tarihi
	Tıbbi Cihaz
	Avrupa Birliği Yetkili Temsilci
	Reçete ile satılır



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, ABD

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belçika

CE 0123

Düzenlenme tarihi: 01/2020

91024046-0120

Alcon

© 2020 Alcon Inc



91024046-0120