

SUNUM ŞEKLİ

Her bir lens, poliamidoamin ve poli(akrilamid-akrilik) asit kopolimerlerinden oluşan yaklaşık %0,3'lük polimerik ıslatma ajanıyla fosfat tamponlu salin solüsyonu içeren ve buharla sterilize edilmiş folyo kaplı plastik blister pakette ambalajlanmıştır. Ambalajda temel eğri, çap, diyoptri, ADD gücü (multifokal lensler), üretim seri numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yer alır.

Lensler, tek tek kapatılmış en fazla 90 kontakt lens içeren karton kutularda steril olarak sunulmaktadır.

ETİKETTE KULLANILAN SEMBOLLER

SEMBOL	TANIM
BC	Temel Eğri
DIA	Çap
PWR	Güç
D	Diyoptri (lens gücü)
ADD	İlave güç
MAX ADD	Maksimum etkili ilave güç
LO	Düşük
MED	Orta
HI	Yüksek
L	Sol
R	Sağ
	Ambalaj atığı lisans işareti
	Tekrar kullanmayın
	Seri kodu
	Son kullanma tarihi
EXP	Son kullanma tarihi
	Tek steril bariyer sistemi
	Buharla sterilize edilmiştir
	İngilizce (dil için iki harfli kod örneği)
	Avrupa uygunluk işareti
	Dikkat
	Kullanma talimatına veya elektronik kullanma talimatına bakınız
	Blister ambalaj hasarıysa kullanmayınız ve kullanma talimatına bakınız
	Üretici
	Üretim tarihi
	Tıbbi cihaz
	Tekil Cihaz Tanımlayıcısı
	Avrupa Topluluğundaki/Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilci
	LENSLERİ TUVALETE YA DA LAVABOYA ATMAYINIZ
	Reçete ile satılır

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, ABD

0123

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belçika

İthalatçı:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Almanya

Distribütör: Alcon Laboratuvarları Tic. A. Ş.
34805, Kavacık-Beykoz/İstanbul, Türkiye

Kontakt lens **Kullanma Talimatı** Alcon web sitesinde de mevcuttur: www.ifu.alcon.com.

Düzenlenme Tarihi: 2024-10

900491363-1024

Alcon

© 2024 Alcon Inc.

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



900491363-1024