

- Lens gözünüzde yırtılırsa, lens parçalarını normal lensi çıkardığınız şekilde tutarak dikkatlice çıkartınız. Lens parçaları kolayca çıkmıyorsa göz dokusunu sıkıştırmayınız. Salin ile durulayınız ve lens parçalarını çıkartmayı yeniden deneyiniz. Bu işlem işe yaramazsa yardım için göz doktorunuza ile iletişime geçiniz.

Genel Acil Durumlar:

Gözlere herhangi bir türde kimyasal (ev ürünleri, bahçe çözeltileri, laboratuvar kimyasalları vs.) sıçraması durumunda:

- Gözlere salın solüsyonu veya çesme suyuyla bir an önce yıkayınız.
- Lens çıkarılmalı ve atılmalıdır ve hemen göz doktoruyla iletişime geçilmeli ya da geciktirmeden bir hastane acil servisine başvurulmalıdır.

CİDDİ OLAY RAPORLAMA

Bu tıbbi cihazın kullanımından kaynaklanan tüm ciddi olaylar Alcon Laboratories, Inc.'e bildirilmelidir:

AB - yerel ülke bürosu veya Alcon distribütörünüz ile temas kurun

E-posta: qa.complaints@alcon.com

Web sitesi: <https://www.alcon.com/contact-us>

Ciddi olgular ayrıca ülkenizin tıbbi cihazlarla ilgili yetkili makama da bildirilmelidir

KULLANIM KILAVUZU

ÖNERİLEN TAKMA VE YENİSİYLE DEĞİŞTİRME PROGRAMI

ve yenisiyle değiştirme programı bireyin kişisel ihtiyaçları ve fizyolojik koşullar temelinde göz doktoru tarafından belirlenmelidir. Göz doktoru sadece günlük kullanım veya 6 geceye kadar uzun süreli kullanımı önerirler. Herkes kesinlikle 6 gececik maksimum kullanım süresine erişemeyebilir.

Lensler her ay veya göz doktorunun tavsiyesi doğrultusunda daha sıklıkla atılmalı ve yenisiyle değiştirilmelidir.

GÖZ DOKTORLARI İÇİN TAKMA KILAVUZU

Bir bireye lotraficon B yumuşak kontakt lenslerin takılması için gerekli olan oküler sağlık ve refraktif özellikler, diğer yumuşak kontakt lenslerin takılması için gerekli olanlara benzerdir. Bireyin yumuşak kontakt lens kullanımı için uygun bir aday olduğundan emin olmak için kapsamlı bir takma öncesi muayene yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için www.ifu.alcon.com adresinde kapsamlı bir takma kılavuzu mevcuttur.

LENS KULLANIM TALİMATLARI

- Kontakt lensleri ellemeden önce ellerinizi iyice yıkayıp, durulayın ve temiz, pamuksuz bir havlu ile tamamen kurulayın.
- Açmadan önce blister ambalajı (taze yeni lens içeren) hafifçe çalkalayınız.
- Lens blister ambalajdan (veya daha önce kullanılmış lensler için lens saklama kutusundan) avucunuza dikkatlice boşaltarak çıkarın.
- Lensin doğru kısmının dışa baktığından ve her bir gözünüz için doğru lens olduğundan emin olun.
- Takmadan önce lensleri inceleyiniz.
- Hasarlı veya temiz olmayan lensleri kullanmayınız.

LENS TAKMA TALİMATLARI

- Lensleri takmadan önce, her zaman her bir blister paket üzerindeki lens gücünün her bir göz için doğru olup olmadığını kontrol edin ve son kullanma tarihinden sonra lensleri kullanmayın. Lenslerin uzun süreli kullanımında, yanlışlıkla önerilen kullanım süresini aşmasını önlemek için kullanım döngüsündeki ilk kullanım tarihini not edin.
- Kontakt lensleri ellemeden önce ellerinizi iyice yıkayıp, durulayın ve temiz, pamuksuz bir havlu ile tamamen kurulayın.
- Lens temiz ve kuru sağ ya da sol işaret parmağınızın ucuna yerleştirin. Aynı elin orta parmağını alt karpiklerinizle yakın yerleştirerek, alt göz kapağını aşağı çekin.
- Üst göz kapağını kaldırmak için diğer elin parmaklarını kullanın.
- Lens doğrudan göze (kornea) yerleştirin ve parmağı hafifçe lensten çekin.
- Aşağı bakın ve alt göz kapağını yavaşça bırakın.
- Doğrudan karşıya bakın ve üst göz kapağını yavaşça bırakın
- Hafifçe göz kırpin.

LENS ÇIKARMA TALİMATLARI

- Ellerinizi iyice yıkayıp durulayın ve temiz, pamuksuz bir havlu ile tamamen kurulayınız.
- Gözlerinizi birkaç kez kirpiniz.
- Yükarı bakarken, parmağınızın ucunu kullanarak lensi gözünüzün beyaz kısmına doğru kaydırın.
- Lensleri başparmak ve işaret parmağı arasında hafifçe sıkıştırarak çıkarınız. Göz dokusunu sıkıştırmayınız.
- Lens çıkarmak güçse, kayganlaştırıcı ve ıslatıcı damla damlatınız ve birkaç dakika sonra tekrar deneyiniz.
- Lensleri, lens kabından ya da gözlemlenenden çıkarmak için hiçbir zaman cimroz, vakum, sivri cisimler veya tırnaklarınızı kullanmayınız.

Lensin çıkarılması konusunda sorun yaşarsanız (lens yerinden çıkmış veya hasar görmüşse), yukarıdaki **BİR SORUN GÖRÜLÜRSE NE YAPILMASI GEREK** bölümüne bakınız.

LENSLERİN BAKIMI İÇİN TEMEL TALİMATLAR

- Değiştirme zamanı öncesinde, her lens tekrar kullanılmadan önce gözden çıkarılıp uygun biçimde temizlenmeli, durulanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
 - Göz doktoru uygun bir lens bakım sistemi için öneri ve talimatlarla bulunmalıdır. Özellikle göz doktoruna danışmadan lens bakım sistemini değiştirmeyiniz.
 - Lens bakım ürünleri farklı kullanım ve talimatlara sahiptir. Göz problemlerinden veya lenslerinizin zarar görmesinden kaçınmak üzere kullanılan ürün(ler) için daima üreticinin talimatlarını okuyup, bunlara dikkatlice uyunuz.
 - Bazı lens bakım ürünleri, bir ovma ve durulama basamağı gerektirir. Bu durumda oddi göz enfeksiyonları riskini azaltmak üzere lens bakımı üreticisinin solüsyon miktarı ve yıkama süresi talimatlarına uyunuz.
- Lenslerinizin Sivriya Batırılması ve Saklanması
 - Lenslerinizin sivriya batırıldığını (sakladığınız) her seferinde sadece taze kontakt lens bakım solüsyonu kullanın.
 - Lenslerinizi temizleme, durulama ve dezenfeksiyon basamaklarının tekrar edilmesi gerekmeden önce saklayabileceğiniz süre kullanılan lens bakım ürününe bağlı olarak değişecektir. Üreticinin talimatlarına uyunuz.
 - Solüsyonun yeniden kullanımı etkili lens dezenfeksiyonunu azaltır, şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabileceğinden lens kutunuzda kalmış eski solüsyonu yeniden kullanmayınız veya "üzzerine eklemek yapmayınız". "Üzerine eklemek yapmak", lens kutunuzda bulunan solüsyonu üzzerine taze solüsyon eklemek anlamına gelir.
 - Bir lens bakım ürününi açtıktan sonra, ürünün üreticisi tarafından önerilen süre sonrasında kalan solüsyonları atınız.
 - Sadece sert veya katı gaz geçiren lensler için tasarlanmış ürünleri kullanmayınız.
 - İsyyi hiçbir zaman lens bakım solüsyonları ile veya lensleri dezenfekte etmek için kullanmayınız.
 - Lenslerinizi dezenfekte etmek üzere hiçbir zaman su, salin solüsyonu veya nemlendirici damlatları kullanmayınız. Bu solüsyonlar lenslerinizi dezenfekte etmeyecektir. Önerilen dezenfeksiyon solüsyonunun kullanılmaması şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir.

LENS BAKIM SÜLÜŞYONLARI

Silikon hidrojel yumuşak kontakt lenslerle kullanım için uygun şekilde endike olan lens bakım ürünleri lotraficon B kontakt lenslerin bakımı için kullanılabilir. Göz doktoru tarafından önerilen lens bakım ürünleri için üreticinin talimatlarını izleyin. Alcon, mevcut olduğu durumlarda aşağıdaki ürünleri önermektedir:

- AOSEPT™ PLUS with HydraGlyde™ Temizlik ve Dezenfeksiyon Solüsyonu
- OPTI-FREE™ PureMoist™ Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu

LENS KUTUSU İÇİN TEMEL TALİMATLAR

Kontakt lens bakım solüsyonları ve kontakt lens kutuları değişikendir ve farklı kullanım amaçları ve talimatlarına sahiptir. Bazı kutular özellikle kontakt lenslerin saklanması amacı taşırken, diğerleri özellikle hidrojen peroksit temizleme ve dezenfeksiyon sistemleri ile kullanım için nötralize edici bir disk içerecek şekilde tasarlanır. Günlük bazda takılmazsa, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş lensler kullanılan kontakt lens solüsyonu ve lens kutusuna bağlı olarak değişen zaman sürelerinde açılmamış kapta saklanabilir. **Kullanılan lens bakım ürünleri için üreticinin talimatlarına daima uyunuz.**

- Göz doktoru bireye önerilen lens bakım solüsyonu (solüsyonlar) ve lens kutusunun nasıl kullanılacağına açıklımalıdır.
- Kontakt lens kutularını bakteriyel üreme kaynağı olabilir ve kontaminasyondan veya lenslerin zarar görmesinden kaçınmak üzere uygun temizlik, kurutma ve yenileme gerektirir:
 - Kontakt lens kutularını uygun kontakt lens solüsyonu ile temizleyin ve lens kutusu talimatlarına göre kurutun. Havada kurutma veya tüysüz bir havlu ile silme gibi kurutma talimatları kullanılmayan lens kutusuna bağlı olarak değişebilir.
 - Kontakt lens kutularını en az her 3 ayda bir kez ya da lens kutusu üreticisinin önerisine uygun şekilde değiştirilmelidir.
 - Bir nötralize edici disk içeren özel olarak tasarlanmış lens kutuları, üretici talimatlarına göre veya temiz ve dezenfekte edilmiş lensler yama ve batmaya sebep oluyorsa daha erken bir vakte yenisiyle değiştirilmelidir.
 - Su veya herhangi bir steril olmayan çözücü ile lenslerinizi saklamayınız veya lens kutusunu bunlarla durulamayınız. Lenslerinizin ve lens kabının kontaminasyonundan kaçınmak için yalnızca taze lens bakım çözeltili kullanınız. Steril olmayan çözeltilerin kullanımı şiddetli enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir.

İMHHA VE GERİ DÖNÜŞÜM

Kontakt lensleri ve blister ambalaj kapağını çöp kutusuna, lavaboya veya tuvalete atmayınız. Karton ambalaj ve blister ambalajın polipropilen (PP) plastik kaplaması çöp kutusuna atılmalı veya yerel atık yönetimi kılavuzuna göre geri dönüştürülmelidir.

KABİN İÇERİĞİ (Sunum şekli)

Her lens, tamponlu salin solüsyonu ihtiva eden folyo blister ambalajda temin edilir ve buharla sterilize edilir. Salin solüsyonunun bileşimi aşağıdaki gibidir:

- AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™, AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ for Astigmatism, ve AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ Multifokal: 0,2 Vinipliridon / Dimetilaminoetimetakrilat Kopolimer ve %0,04 Polioksietilen-polioksibütülen ıslatıcı maddeler içeren PBS.

Blister ambalaj, temel eğri, çap, diyoptri gücü, silindri gücü ve eksenli (varsa) ve ADD gücü (varsa) dahil olmak üzere lens parametrelerinin yanı sıra üretim lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ile işaretlenmiştir. Ambalaj etiketi ayrıca bir ürün kodu da içerebilir [LFB110E (AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ için); LFB110TE (AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ for Astigmatism için); LFB110MF (AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ Multifocal için)].

Lensler, 6 adede kadar aynı ayrı kapatılmış kontakt lens içeren kartonlar halinde steril olarak tedarik edilir.

ETİKETTE KULLANILABİLECEK KISALTMALAR VE SEMBOLLER

KISALTIMA/SEMBOL	TANIM
BC	Temel Eğri
DIA	Çap
PWR	Güç
D	Diyoptri (lens gücü)
L	Sol
R	Sağ
CYL AXIS	Silindri gücü ve eksen
ADD	İlave güç
MAX ADD	Maksimum etkili ilave güç
LO	Düşük
MED	Orta
HI	Yüksek
	Ambalaj atığı lisans işareti
	Seri kodu
	Son kullanma tarihi
	Son kullanma tarihi
	Tek steril bariyer sistemi
	Buharla sterilize edilmiştir
	Avrupa uygunluk işareti
	Dil için iki harfli kod (Resimdeki örnek: İngilizce)
	Dikkat
	Kullanım talimatlarına veya elektronik kullanım talimatlarına bakın
	Blister ambalaj hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına başvurun
	Üretici
	Üretim Tarihi
	Tıbbi Cihaz
	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı
	LENSLERİ TUVALETE VEYA LAVABOYA ATMAYIN
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'nde yetkili temsilci
	Reçete ile satılır

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, ABD

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belçika

İthalatçı:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Almanya

Distribütör: Alcon Laboratuvarları Tic. A. Ş.
34805, Kavacık-Beykoz/İstanbul, Türkiye

Kontakt lens **Kullanım Talimatları** www.ifu.alcon.com web sitesinde de mevcuttur.

Düzenlenme tarihi: 2024-08

900478516-0824

Alcon

© 2024 Alcon Inc.

¹ Check for actual product availability, which may change over time.

² Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

³ Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



900478516-0824